




O'Cool terapeutické gamaše pre kone

Rýchlo a jednoducho znížte teplotu konských končatín po namáhavom výkone alebo akútnom úraze. Vyhnete sa tak zápalom, bolestiam svalov a šliach.

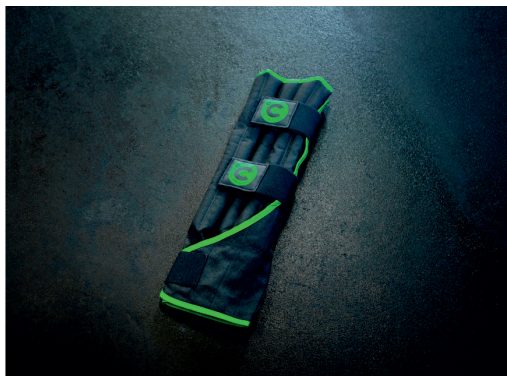

Prečo práve naše gamaše?

Šetrite svoj čas a energiu

- **rýchla a nenáročná príprava** v priebehu niekoľkých minút
- **jednoduchá aplikácia**
- dlhodobý chladiaci účinok
- jednoduché čistenie, viacsobné použitie
- **vždy po ruke** – skladovanie alebo prenos **v špeciálnej taške na príslušenstvo**
- praktické sušenie na rozbalenej taške na príslušenstvo

To najlepšie pre vášho koňa

- **zdravotne nezávadný vnútorný a vonkajší materiál**
- **suchá forma chladenia**
 - neuniká žiadna voda
- nie je potrebné žiadne prekrytie ani ponožka
- **precízny dizajn** pre nerušený pohyb koňa
- 3 veľkosti pre **pevné a dokonalé uchytenie**
- vhodné pre predné aj zadné nohy



RÝCHLE
CHLADENIE



JEDNODUCHÉ
POUŽITIE



SUCHÁ FORMA
CHLADENIA

www.o-cool.eu

Unikátny dizajn
Perfektný strih
Moderné materiály

**Vaše
najlepšie
rozhodnutie**


Terapeutické gamaše | **64,90 - Eur / pár**



- 3 veľkosti pre správne sediaci tvar
- vhodné na predné aj zadné nohy

Náplň: zmes polyakrylátových absorbentov
Vonkajší materiál: polyesterová látka

Rozmery	S	M	L
A/cm	33	37	41
B/cm	33	33	35
C/cm	44	44	48
Váha / g	730	840	1050

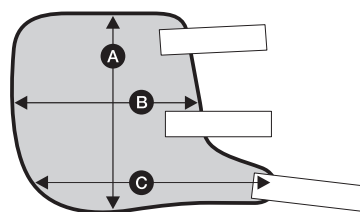

Taška na príslušenstvo | **39,90 - Eur**



- špeciálna taška pre vaše O'Cool terapeutické gamaše a ďalšie príslušenstvo
- nepremokavá
- vhodná na ich vysušenie alebo prenos

Materiál: polyester

Viacúčelová funkcia

O'Cool gamaše sa môžu tiež použiť na zahriatie pred výkonom. Jednoducho ponorte gamaše na pár minút do teplej vody. Upevnite ich priamo na nohy na 20 minút. Tkanivá sa pekne zahrejú. Po práci proces zopakujte so studenou vodou na ochladenie.

www.o-cool.eu

Zoznámte sa s novými gamašami vysokej O'Cool kvality

Už nemusíte dlhé minúty stáť s hadicou v ruke alebo sa trápiť s vreckami s tvrdým ľadom alebo gélom, ktoré sa roztopia za 10 minút. Ochladzujte postihnuté oblasti rýchlo a efektívne. Eliminujte riziko poškodenia tkanív pri extrémnom podchladení. Terapeutické O'Cool gamaše môžete použiť znova a znova. Stačí ich jednoducho namočiť do studenej vody a upevniť na končatiny.

O'Cool návod

Príprava:

1. **Namočte gamaše do studenej alebo ľadovej vody na približne 5 minút.** Ak sú úplne suché, ich aktivačný čas trvá približne 15 minút.
2. **Povrch gamaší osušte handrou,** aby z nich nekvapkala voda.

O'Cool tipy a triky:

Čím chladnejšiu vodu použijete, tým budú gamaše chladnejšie. Na urýchlenie absorpcie vody môžete prstami jemne roztláčať vnútorný materiál po celej výške gamaší.



Použitie:

1. **Upevnite nasiaknuté gamaše na nohu koňa pomocou suchých zipsov.** Gamaše sú označené ako ľavá a pravá.
2. Nechajte gamaše na konských nohách pôsobiť **20 - 30 minút.**



Starostlivosť:

1. Ak sú gamaše po použití špinavé, **jednoducho ich opláchnite vodou.**
2. **Zaveste ich, ideálne na našu špeciálnu tašku na príslušenstvo.**

O'Cool tipy a triky:

Jednoducho tašku rozložte otvorením bočných zipsov a pripevnite gamaše na jej vnútornú časť pomocou suchých zipsov. Ak vyrážate na cestu, gamaše zabaľte do tašky. Je nepremokavá.



Odporúčania

Nepoužívajte na poranenia, odreniny alebo poškodenú kožu.

Neperte v práčke.

Nesušte na slnku alebo na vykurovacích zariadeniach.

Vyhňte sa kontaktu so slanou vodou. Zlikvidujte ako bežný komunálny odpad.

Kontakty

Levice invest, s.r.o
Stromová 13
831 01 Bratislava
Slovensko

E-mail: info@o-cool.eu
Mobil: +421 903 200 161